



Diabetescare

Ypsomed GmbH · Höchster Straße 70 · 65835 Liederbach

Deutsche Post 

PD Dr. med. habil. R. Lundershausen
Dr. med. Sven Becker
Ernst-Thälmann-Strasse 25
99085 Erfurt

Ypsomed GmbH
Höchster Straße 70
65835 Liederbach / Germany
Tel. +49 6196 7007-0
Fax +49 6196 7007-100
www.ypsomed.de
info@ypsomed.de

08.03.2018

Jetzt neu: die mylife™ Orbit® Universal Kanülen und das mylife™ YpsoPump® Reservoir

Sehr geehrte Damen und Herren ,

ab sofort bieten wir Ihren mylife™ YpsoPump® Patienten noch mehr Flexibilität in der Anwendung des mylife™ YpsoPump® Orbit® Infusionssets als auch bei der Verwendung des Insulins Ihrer Wahl.

Unsere mylife™ YpsoPump® Orbit® Infusionssets wurden durch die einzeln erhältlichen mylife™ Orbit® Universal Kanülen ergänzt.

Die mylife™ Orbit® Universal Kanülen sind in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich. Bei der Soft-Ausführung haben Ihre Patienten die Wahl zwischen den Kanülenlängen 6 mm und 9 mm, bei der Stahl-Variante stehen Ihnen die Optionen 5.5 mm und 8,5 mm Kanülenlänge zur Auswahl. Ein zügiger Austausch der Kanüle und Anpassung der Setzstelle kann ohne Wechsel des Schlauchs erfolgen. Weiterhin genießen Ihre Patienten den bewährten Vorteil der 360°-Bewegungsfreiheit.

Ebenfalls jetzt neu und bereits erhältlich ist das mylife™ YpsoPump® Reservoir!


Das mylife™ YpsoPump® Reservoir wurde für die Insulinabgabe mit dem mylife™ YpsoPump® System entwickelt und ist **selbst befüllbar mit einem Insulin nach Wahl:**

- Fiasp®
- NovoRapid®
- Humalog®
- Apidra®

Mithilfe des mylife™ YpsoPump® Reservoirs kann ein leeres Reservoir einfach mit einem schnellwirkenden Insulin der Wahl mit einer Konzentration von 100 U/ml befüllt werden. Das Reservoir kann befüllt im Kühlschrank (~ 2-8 °C) bis zu 30 Tage lang aufbewahrt werden.¹ Zudem kann das befüllte Reservoir in der mylife™ YpsoPump® bis zu 7 Tage lang verwendet werden und ist auch für einen sehr geringen Insulinbedarf geeignet.

Mehr Informationen und Informationsmaterial für Ihre Kunden erhalten Sie bei unserem Kundenservice unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 977 66 33 oder info@ypsomed.de

¹ Bitte beachten Sie die Packungsbeilage des Insulinherstellers.

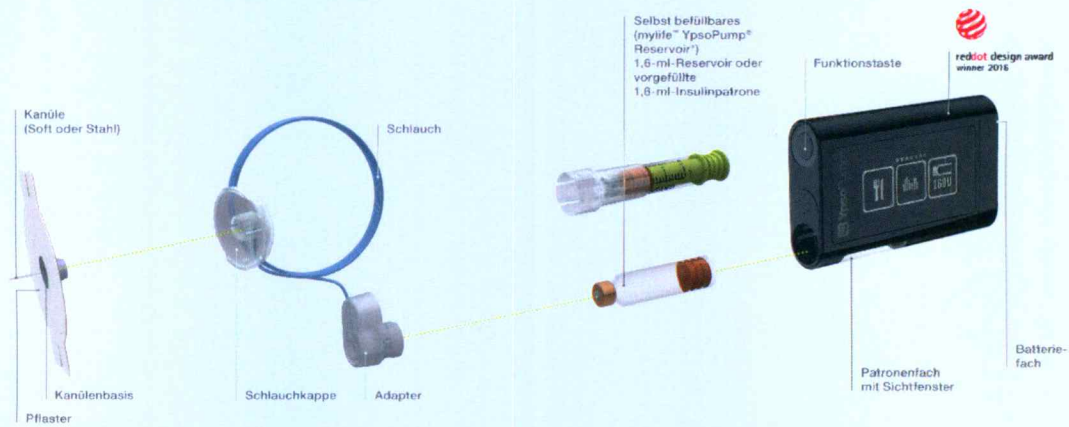

Damit wir auch weiterhin unsere Produkte und unseren Service kontinuierlich verbessern können, ist uns Ihre Meinung wichtig. Daher würden wir gerne von Ihren Erfahrungen mit der Insulinpumpentherapie profitieren und Sie bitten, das beiliegende Faxformular auszufüllen und an die Nummer **06196-7007100** zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Scherff
Geschäftsführer
Ypsomed GmbH

i.V. Oliver Ohlmann
Leiter Customer Service
Ypsomed GmbH

Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie jederzeit ohne Angaben von Gründen gegenüber der Ypsomed GmbH (Höchster Str. 70, 65835 Liederbach, info@ypsomed.de) der weiteren Verwendung Ihrer Daten widersprechen können.